

PULSENSE アプリケーション／ファームウェアアップデート手順 ファームウェア Ver1.10 用

現在ご利用の機器で新しい PULSENSE View をご利用いただくためには、

【1】 アプリケーションのアップデート

【2】 機器のファームウェアのアップデート

を実施していただく必要があります。実施には約 15 分かかります。

準備いただくもの

- PULSENSE 本体
- 付属のクレードル
- AC アダプターもしくは充電可能な USB ポート
- ご使用中のスマートフォン（インターネット接続、および本体と Bluetooth[®] 接続ができるもの）
- PS Uploader がインストールされた PC（PS-500 を PC でご利用の方）

【1】 アプリケーションのアップデート

まず始めに、アプリケーションのアップデートを行います。

PULSENSE View for iOS Ver 1.0.4 より前のバージョンの場合、アップデートが必要です。

PULSENSE View for Android[™] Ver 1.0.5 より前のバージョンの場合、アップデートが必要です。

アプリケーションのバージョン確認方法


PULSENSE View にて、[設定] - [インフォメーション] - [このアプリについて]



【iPhone の場合】

・App Store より Ver 1.0.4 以降の PULSENSE View for iOS をダウンロードしてください。

- (1) App Store のアイコンに図のようなマークが表示されます。
※下図は 3 件のアップデートがある場合の表示になります。

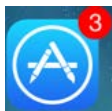

- (2) App Store から右下のアップデートをタップし、表示されるリストから、PULSENSE View を選択します。



- (3) 画面の案内に沿ってアップデートを実施します。

以上で iPhone アプリケーションのアップデートは終了です。

【Android™ の場合】

Google Play または Play ストアより、Ver 1.0.5 以降の PULSENSE View for Android をダウンロードしてください。

1. 自動アップデートを設定している場合
 - (1) お客様の操作は不要で、自動的にアップデートされます。
2. 自動アップデート設定を解除している場合
 - (1) Google Play または Play ストアから PULSENSE View を選択します。
 - (2) 画面の案内に沿ってアップデートを実施します。

以上で Android™アプリケーションのアップデートは終了です。

【2】 機器のファームウェアのアップデート


続いて機器のファームウェアアップデートを行います。

ファームウェアバージョンが、1.10 より前の機器は、アップデートが必要です。

ファームウェアのアップデートによって、機器に記録されたデータが消去されることはありません。

【ファームウェアバージョンの確認方法】 -スマートフォンから確認する場合-


PULSENSE Viewにて [設定] - [機器設定] - [ファームウェア情報]

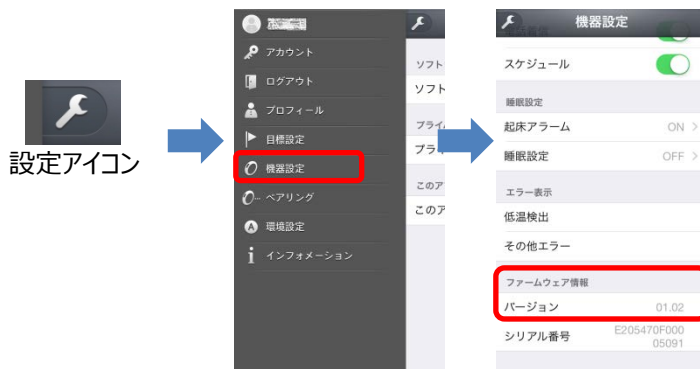

【ファームウェアバージョンの確認方法】 -PS-500 機器本体から確認する場合-

本体上部をダブルタップしてメニューを表示させます。

[メニュー] - [システム] - [バージョン]

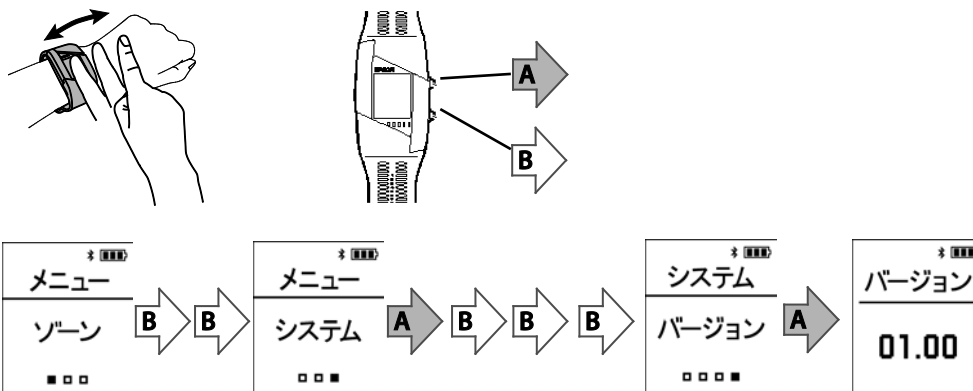

【スマートフォンからアップデートする場合】

- (1) PULSENS View から画面左上部の設定アイコンをタップし、設定画面に移行します。



- (2) [機器設定]をタップし、画面の一番下までスクロールし、[ファームウェアアップデート] をタップします。



- (3) 画面の指示に従って、機器をクレードルにセットし充電状態にします。
スタートボタンを押すとファームアップデートが開始されます。



- (4) ファームウェアの転送中は、画面上部に進捗をしめすバーが表示されます。

注意 : アップデートが完了するまで機器をクレードルから取り外さないでください。



ファームウェアの転送が終了するまで、おおよそ 15 分かかります。

(5) ファームウェアの転送が終了すると下記表示になります。



【参考】

[実施しました]をタップすると、手順（7）の案内画面が表示されます。



注意：

以下手順（6）－（9）の操作は、順番通り必ず実施してください。
実施されないと、正しく動作しないことがあります。

(6) スマートフォンの設定の Bluetooth® から、ご使用中の PULSENSE 機器のペアリング解除を行います。

(7) スマートフォンを再起動します。

(8) 再起動後、PULSENSE View を再度立ち上げ、[設定]（設定アイコン）をタップし、設定画面を表示します。

(9) [ペアリング] をタップし [新しい機器を追加する] の+アイコンをタップし、再度、機器登録を行います

以上で、ファームウェアアップデートは終了です。

【PC からアップデートする場合 (PS-500 のみ)】

PS-500 のお客様は、PC を用いてファームウェアをアップデートできます。

1. PS Uploader を Ver.1.0.2 にアップデート
2. ファームウェアを 1.1.0 にアップデート

の手順で実施します。

1. PS Uploader を Ver.1.0.2 へアップデートする

1. - 1 PS Uploader Ver.1.0.0 をご利用中のお客様

- (1) エプソンのホームページより、最新版の「PS Uploader」をダウンロードしてください。


PS Uploader ダウンロード : http://www.epson.jp/dl_soft/list/5970.htm

- (2) 手順にしたがい、PS Uploader Ver.1.0.2 をインストールします。


ログイン情報は、そのまま利用することができます。

1. - 2 PS Uploader Ver.1.0.1 をご利用中のお客様

- (1) PC を起動するとタスクトレイにアップデートをお知らせするポップアップが表示されます。

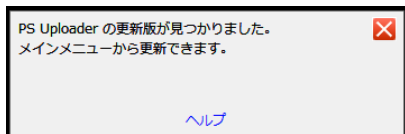

- (2) PC のタスクトレイから PULSENSE View のアイコンを右クリックして、メインメニューを選択します。

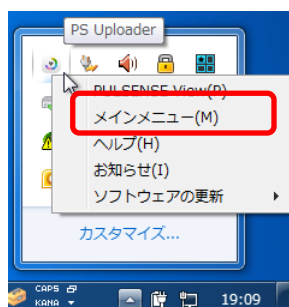

- (3) PS Uploader を起動し、[PS Uploader の更新] をクリックします。



クリックして下さい


- (4) PS Uploader のアップデートが実行されます。

以上で完了になります。既にログインがされていれば、再ログイン等の操作は不要です。


2. ファームウェアのアップデート

(1) PULSENSE View にログインした状態で、機器をクレードルにセットし PC に接続します。


(2) タスクトレイにアップデートをお知らせするポップアップが表示されます。

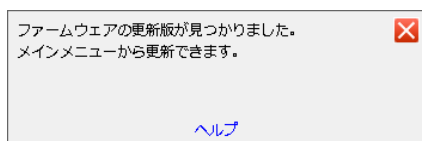

(3) PC のタスクトレイから PULSENSE View のアイコンを右クリックして、メインメニューを選択します。

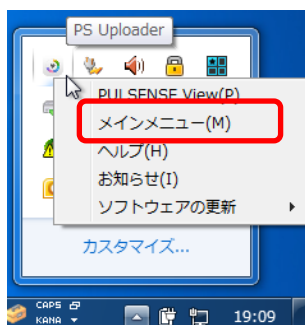


(4) PS Uploader を起動し、「ファームウェアの更新」をクリックします。

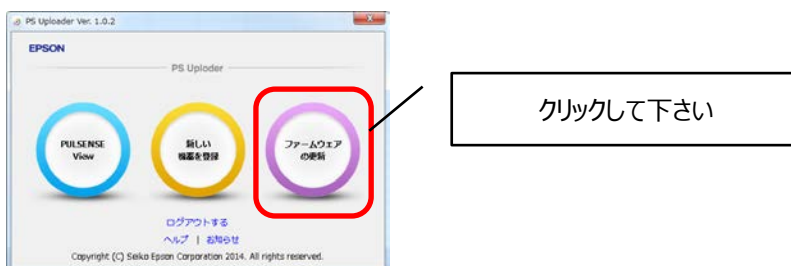

(5) ファームウェアのアップデートが開始されます。

アップデートが完了するまで機器を取り外さないでください。

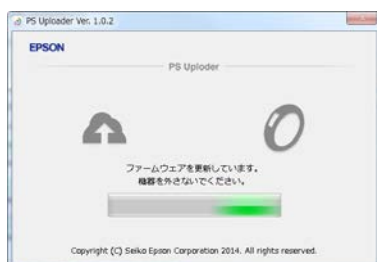

(6) PC だけをご利用のお客様は、下記表示で終了です。



【ご注意ください】

スマートフォンでもご利用になる方は、お使いのスマートフォンで、本手順書の

- ・PULSENSE View のアプリケーションのアップデート : 1 ページ 参照
- ・ペアリング解除、スマートフォン再起動、機器設定 : 5 ページ 手順 (6) から (9) 参照

を必ず実施してご利用下さい。

商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Microsoft, Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標登録です

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

iPhone は Apple Inc. の商標です。

Android™ は Google Inc. の商標です。

IOS は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

以上