

PULSENSE アプリケーション／ファームウェアアップデート手順

ファームウェア Ver1.10 以降へのアップデート用

現在ご利用の機器で新しい PULSENSE View をご利用いただくためには、

【1】 アプリケーションのアップデート

【2】 機器のファームウェアのアップデート

を実施していただく必要があります。実施には約 15 分かかります。

準備いただくもの

- ・PULSENSE 本体
- ・付属のクレードル
- ・AC アダプターもしくは充電可能な USB ポート
- ・ご使用中のスマートフォン（インターネット接続、および本体と Bluetooth[®] 接続ができるもの）
- ・PS Uploader がインストールされた PC（PS-500 を PC でご利用の方）

【1】 アプリケーションのアップデート

まず始めに、アプリケーションのアップデートを行います。

iOS 版の PULSENSE View では Ver 1.0.4 より前のバージョンの場合、アップデートが必要です。

Android™ 版の PULSENSE View では Ver 1.0.5 より前のバージョンの場合、アップデートが必要です。

アプリケーションのバージョン確認方法

PULSENSE View にて、[設定] - [インフォメーション] - [このアプリについて]

設定アイコン



【iPhone の場合】

・App Store より Ver 1.0.4 以降の PULSENSE View をダウンロードしてください。

- (1) App Store のアイコンに図のようなマークが表示されます。
※下図は 3 件のアップデートがある場合の表示になります。



- (2) App Store から右下のアップデートをタップし、表示されるリストから、PULSENSE View を選択します。



- (3) 画面の案内に沿ってアップデートを実施します。

以上で iPhone アプリケーションのアップデートは終了です。

【Android™ の場合】

Google Play または Play ストアより、Ver 1.0.5 以降の PULSENSE View をダウンロードしてください。

1. 自動アップデートを設定している場合
 - (1) お客様の操作は不要で、自動的にアップデートされます。
2. 自動アップデート設定を解除している場合
 - (1) Google Play または Play ストアから PULSENSE View を選択します。
 - (2) 画面の案内に沿ってアップデートを実施します。

以上で Android™ アプリケーションのアップデートは終了です。

【2】 機器のファームウェアのアップデート


続いて機器のファームウェアアップデートを行います。

ファームウェアバージョンが、1.10 より前の機器は、最新のファームウェアバージョンにアップデートが必要です。

ファームウェアのアップデートによって、機器に記録されたデータが消去されることはありません。

【ファームウェアバージョンの確認方法】 -スマートフォンから確認する場合-




PULSENSE Viewにて [設定] - [機器設定] - [ファームウェア情報]

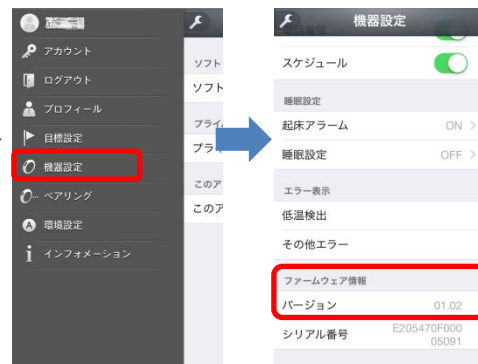

【ファームウェアバージョンの確認方法】 -PS-500 機器本体から確認する場合-


本体上部をダブルタップしてメニューを表示させます。

[メニュー] - [システム] - [バージョン]

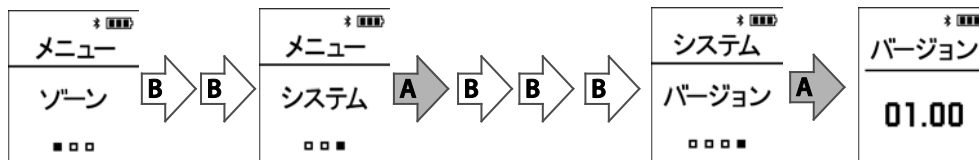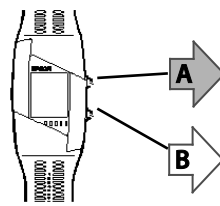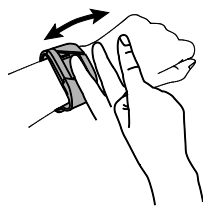

【スマートフォンからアップデートする場合】

- (1) PULSENSE View から画面左上部の設定アイコンをタップし、設定画面に移行します。

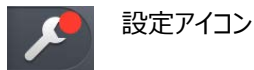

- (2) [機器設定]をタップし、画面の一番下までスクロールし、[ファームウェアアップデート] をタップします。



- (3) 画面の指示に従って、機器をクレードルにセットし充電状態にします。
スタートボタンを押すとファームアップデートが開始されます。



- (4) ファームウェアの転送中は、画面上部に進捗をしめすバーが表示されます。

注意 : アップデートが完了するまで機器をクレードルから取り外さないでください。



ファームウェアの転送が終了するまで、おおよそ 15 分かかります。

【参考】 転送が完了すると、PULSENSE 機器の LED が以下のように遷移します。



【重要】

青色 LED がひとつ点灯したまま操作不能になった場合は、アップデート失敗の可能性があります。

修理センターで製品の状態を確認しますので、修理センターへ製品をご送付ください。

修理窓口のご案内ページ <http://www.epson.jp/support/shuri/madoguchi/>

ファームウェアバージョンが 1.10 以降の機器で実施した場合

(5) ファームウェアの転送が終了すると下記表示になります。



これで、ファームウェアアップデートは終了です。

ファームウェアバージョンが 1.10 より前の機器で実施した場合

(5) ファームウェアの転送が終了すると下記表示になります。



【参考】

[実施しました]をタップすると、手順（7）の案内画面が表示されます。



注意 :

以下手順（６） – （９）の操作は、順番通り必ず実施してください。

実施されないと、正しく動作しないことがあります。

ファームウェアバージョンが 1.10 以降からアップデートされた場合は（６）～（９）の作業は不要です。

（６） スマートフォンの設定の Bluetooth® から、ご使用中の PULSENSE 機器のペアリング解除を行います。

（７） スマートフォンを再起動します。

（８） 再起動後、PULSENSE View を再度立ち上げ、[設定]（設定アイコン）をタップし、設定画面を表示します。

（９） [ペアリング] をタップし [新しい機器を追加する] の+アイコンをタップし、再度、機器登録を行います

以上で、ファームウェアアップデートは終了です。

【重要】

まれにファームウェアアップデート後にペアリングを解除し、スマートフォンの再起動を行っても、ペアリングができない場合があります。
再起動後もペアリング情報が残っていることがあるためです。



iOS の Bluetooth 設定画面を確認し、「自分のデバイス」に機種名が「未接続」で表示されている場合は、（６）、（７）を繰り返して、スマートフォンからの機器の削除を実施して下さい。



正しく削除されると機種名が「その他のデバイス」に表示されます。

【PC からアップデートする場合 (PS-500 のみ)】

PS-500 のお客様は、PC を用いてファームウェアをアップデートできます。

1. PS Uploader を Ver.1.0.2 にアップデート
2. ファームウェアを 1.10 以降の最新ファームウェアにアップデート

の手順で実施します。

1. PS Uploader を Ver.1.0.2 へアップデートする

1. - 1 PS Uploader Ver.1.0.0 をご利用中のお客様

- (1) エプソンのホームページより、最新版の「PS Uploader」をダウンロードしてください。


PS Uploader ダウンロード : http://www.epson.jp/dl_soft/list/5970.htm

- (2) 手順にしたがい、PS Uploader Ver.1.0.2 をインストールします。


ログイン情報は、そのまま利用することができます。

1. - 2 PS Uploader Ver.1.0.1 をご利用中のお客様


- (1) PC を起動するとタスクトレイにアップデートをお知らせするポップアップが表示されます。

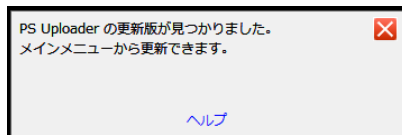

- (2) PC のタスクトレイから PULSENSE View のアイコンを右クリックして、メインメニューを選択します。

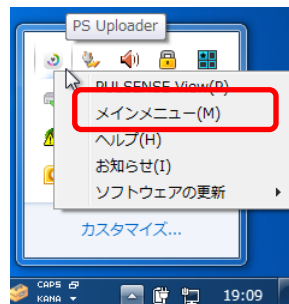

- (3) PS Uploader を起動し、[PS Uploader の更新] をクリックします。

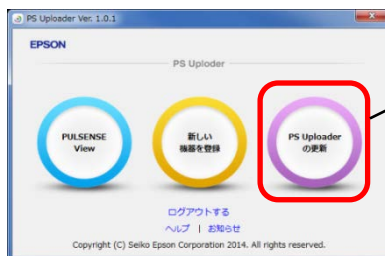

クリックして下さい


- (4) PS Uploader のアップデートが実行されます。

以上で完了になります。既にログインがされていれば、再ログイン等の操作は不要です。


2. ファームウェアのアップデート

- (1) PULSENSE View にログインした状態で、機器をクレードルにセットし PC に接続します。


- (2) タスクトレイにアップデートをお知らせするポップアップが表示されます。

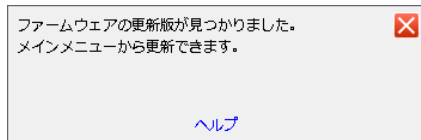

(3) PC のタスクトレイから PULSENSE View のアイコンを右クリックして、メインメニューを選択します。

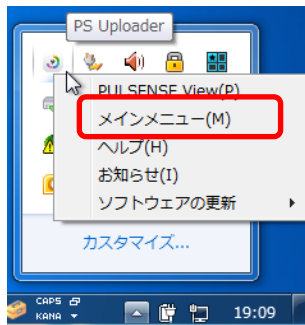


(4) PS Uploader を起動し、「ファームウェアの更新」をクリックします。

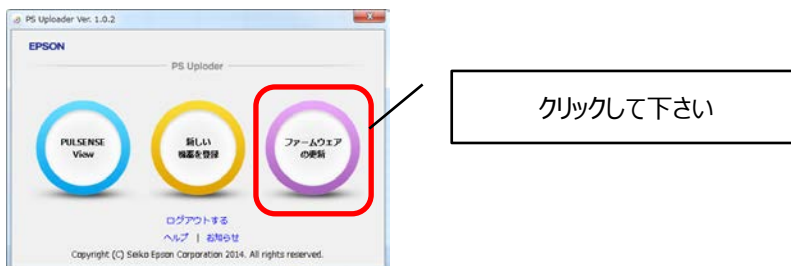

(5) ファームウェアのアップデートが開始されます。

アップデートが完了するまで機器を取り外さないでください。

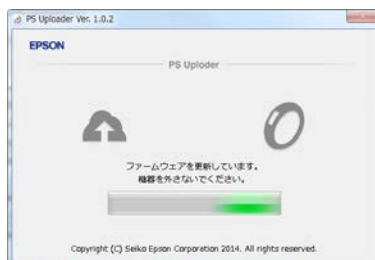

(6) PC だけをご利用のお客様は、下記表示で終了です。



【ご注意ください】

スマートフォンでもご利用になる方は、お使いのスマートフォンで、本手順書の

・PULSENSE View のアプリケーションのアップデート : 1 ページ 参照

・ペアリング解除、スマートフォン再起動、機器設定 : 6 ページ 手順 (6) から (9) 参照

を必ず実施してご利用下さい。

商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Microsoft, Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標登録です

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

iPhone は Apple Inc. の商標です。

Android™ は Google Inc. の商標です。

IOS は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

以上